


# 244 + 245

手压式  
台式封口机



polystar@245, 带切割机、带有插入式工作台和膜卷架

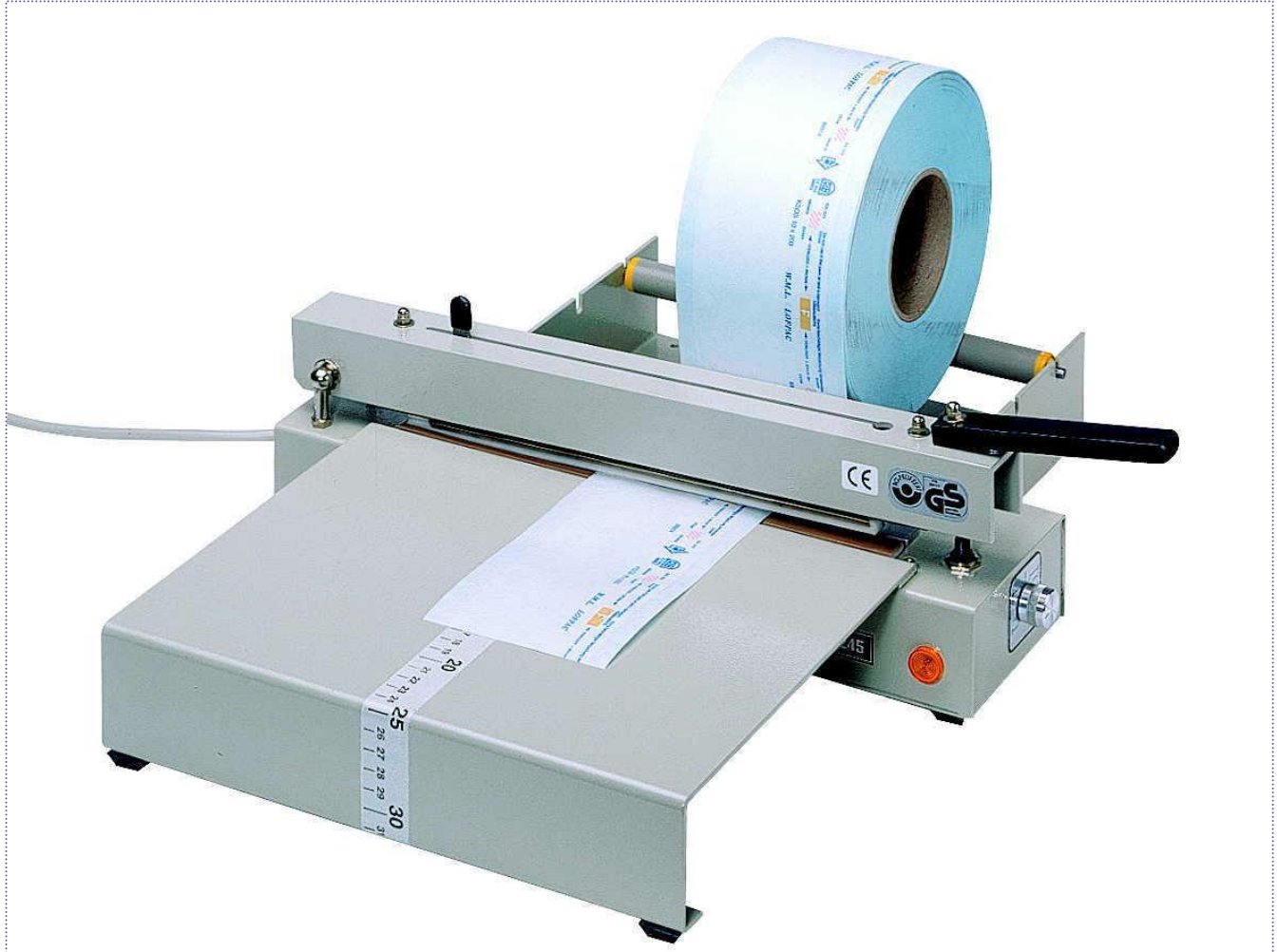

polystar® 244



polystar® 244 带有插入式工作台

## 无论是大包装还是小包装： 一切都可以通过手压封口


### 应用范围:

无论是在牙医诊所，医生诊所还是在医院的病房中... 使用polystar®台式封口器244 + 245，所有必须保持无菌状态的东西都可以安全包装，并且不受大小限制：从牙科镜到手术器械— 在透明胶片卷轴或袋中。封口机非常易于使用。

### 操作:

polystar®台式脉冲封口机可根据热脉冲原理进行工作。接通电源后，这些台式封口机即可立即工作。操作非常简单。无需任何技能或特殊培训即可进行操作：只需将灭菌袋的塑料面放在密封杆上，然后将操纵杆向下压即可。因此，预选的封口时间将自动释放。

封口时间可以预先设置并通过电子方式控制，以确保恒定且安全的封口。封口过程通过黄色控制灯熄灭而发生。在此之后立即开始冷却时间，在该时间中封口材料必须在压力下冷却。

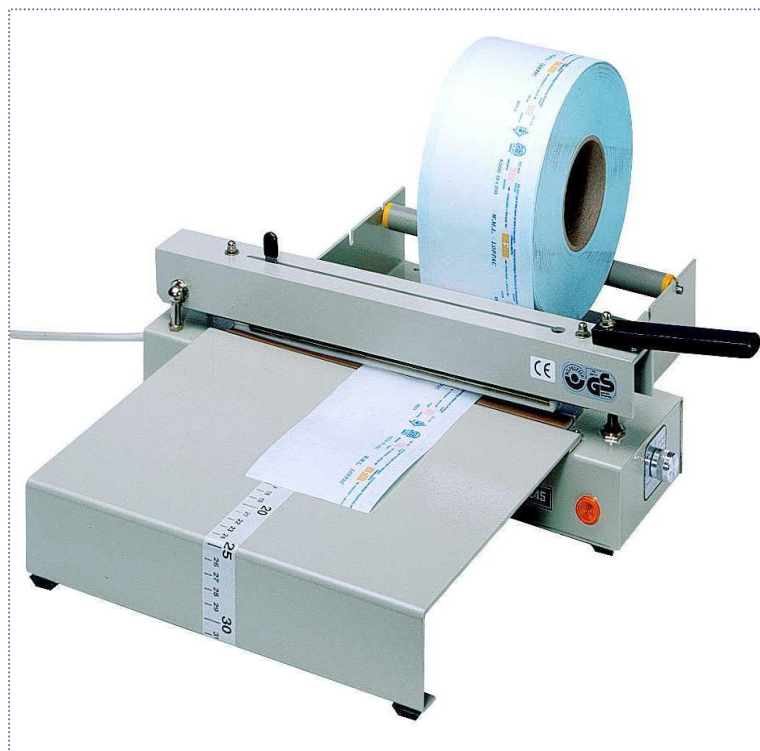

### 优势:


封口宽度8毫米能提供最好的保护，防止细菌进入无菌包装。

### 切割机:

polystar® 245型配备有内置的手动切割机，可通过使用卷轴中的材料根据个人要求制造袋子。切割操作可以在封口过程中完成，以避免不必要的时间浪费。

### 专用设备:

polystar®无菌薄膜桌面封口机可以通过可拆卸的桌子，放卷机或胶卷盒放大，即使空间有限，也可以用于任何用途。符合“GS”认证和“CE”认证。

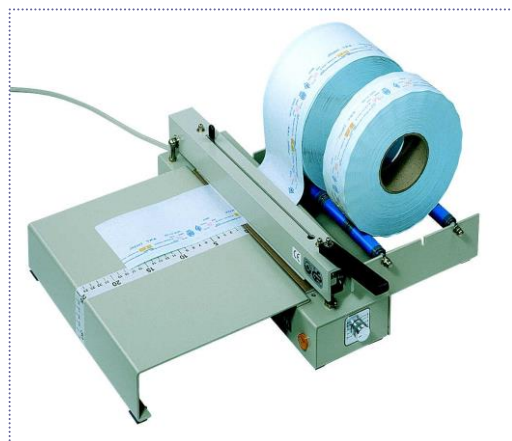

### 技术参数:

polystar®	244 *	245
最大封口长度	250 mm	250 mm
封口宽度	8 mm	8 mm
输入电流	1,2 A	1,2 A
功率	0,27 kWh	0,27 kWh
尺寸	425 x 120 x 135 mm	425 x 120 x 135 mm
重量	4,2 kg	4,4 kg
电源	230 V/50 cps	230 V/50 cps
* = 不带切刀		
所有机器都配有一根3米长的连接电缆。给出的尺寸和重量是近似值。我们保留在不事先通知的情况下进行技术更改的权利。		